

Manual de utilizare

MANUAL DE UTILIZARE
UTILIZARE
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE INSTRUȚIUNI
MANUAL DE INSTRUȚIUNI
INSTRUȚIUNI DE OBSERVAȚIE
NÁVOD K OBSLUZE

Bobby Evo



Cuprins

Prefa ă	5
1. Produsul dumneavoastră	6
1.1. Opțiuni	7
2. Înainte de utilizare	7
2.1. Utilizare preconizată și indicații	7
2.2. Instrucțiuni de siguranță și riscuri aplicabile	8
2.3. Simboluri pe scaunul cu roțile	8
2.4. Transport	9
2.5. Pliere/Desfacere	11
2.6. Depozitare	11
3. Utilizarea scaunului cu roțile	12
3.1. Centură de siguranță	12
3.2. Acționarea frânelor	12
3.3. Montarea sau demontarea suporturilor pentru picioare	14
3.4. Deplierea/rabatarea spătarului	15
3.5. Deschiderea sau închiderea cotierelor B03	16
3.6. Transferul în și din scaunul cu roțile	17 ani
3.7. Mersul în scaun cu roțile	18 ani
4. Instalare și reglare	19
4.1. Conținutul livrării	19
4.2. Scule	19
4.3. Reglarea frânelor	20
4.4. Lungimea suportului pentru picioare	21 de ani
4.5. Poziția plăcii pentru picioare	21 de ani
4.6. Unghiul plăcii pentru picioare	22

5. Întreținere	22
5.1. Puncte de întreținere	22
5.2. Instrucțiuni de întreținere	23 de ani
5.3. Depanare 5.4. Durată de viață așteptată 5.5. Reutilizare	24
5.6. Sfârșitul utilizării	25
5.7. Garanție	25
6. Specificații tehnice	26

Prefa ă

Felicitări! Acum sunteți proprietarul unui scaun cu roțile Vermeiren!

Acest scaun cu roțile este fabricat de personal calificat și dedicat. Este proiectat și produs conform unor standarde înalte de calitate, fiind protejat de Vermeiren.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor Vermeiren. Vă oferim acest manual pentru a vă sprijini în utilizarea acestui scaun cu roțile și în funcțiile sale de operare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual; vă va ajuta să vă familiarizați cu operarea, capacitățile și limitele scaunului dumneavoastră cu roțile.

Dacă aveți în continuare întrebări după ce ați citit acest manual, nu ezitați să contactați distribuitorul specializat. Acesta vă va ajuta cu plăcere.

Notă importantă

Pentru a vă asigura siguranța și pentru a prelungi durata de viață a produsului, vă rugăm să aveți grijă de acesta și să îl verificați și să îl reparați periodic.




Acest manual reflectă cele mai recente evoluții ale produselor. Vermeiren își rezervă dreptul de a implementa modificări la acest tip de produs fără nicio obligație de a adapta sau înlocui produse similare livrate anterior.

Imaginile produsului sunt folosite pentru a clarifica instrucțiunile. Detaliile produsului prezentat pot diferi de produsul dumneavoastră.

Informații disponibile

Pe site-ul nostru web <http://www.vermeiren.com/> veți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a următoarelor informații. Vă rugăm să consultați acest site web în mod regulat pentru posibile actualizări.

Persoanele cu deficiențe de vedere pot descărca versiunea electronică a acestui manual și o pot citi cu voce tare prin intermediul unei aplicații software de conversie a textului în vorbire.

	Manual de utilizare Pentru utilizator și distribuitor specializat
	Manual de service pentru scaune cu roțile Pentru distribuitorul specializat
	Declarație de conformitate CE

1. Produsul dumneavoastră



1. Mânere 2. Spătar

3. Pernițe pentru
brațe 4. Șezut

5. Suporturi pentru picioare

6. Plăci de bază 7.
Cruce

8. Volane (roți față)

9. Roți motrice (roți spate)

10. Frâne

11. Ajutor pentru bacșiș

12. Plăcuță de identificare

1.1. Opțiuni

Contactați distribuitorul dumneavoastră specializat pentru informații despre opțiuni. Acesta vă va oferi cu plăcere sfaturi.

2. Înainte de utilizare

2.1. Utilizare preconizată și indicații

- Acest produs este un dispozitiv medical.
- Indicații și contraindicații: Utilizatorul are scaunul rulant împins de un însoțitor. Scaunul rulant este destinat persoanelor cu dificultăți de mers, utilizării nepermanente și transportului. Diferitele tipuri de fittinguri și accesorii, precum și construcția modulară permit utilizarea completă de către persoanele în vârstă.
- Acest scaun cu roțile este potrivit pentru utilizare în interior și în exterior.
- Acest scaun cu roțile este proiectat și produs exclusiv pentru transportul/transferul unei (1) persoane cu o greutate maximă de 115 kg. Nu este conceput pentru transportul de bunuri sau obiecte și nici pentru nicio altă utilizare decât cea descrisă anterior.
- Folosiți doar accesorii și piese de schimb aprobate de Vermeiren.
- Vă rugăm să citiți toate detaliile tehnice și limitele scaunului rulant din capitolul 6..
- Garanția acestui produs se bazează pe utilizarea și întreținerea normală, așa cum este descrisă în acest manual. Deteriorarea produsului cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau de lipsa de întreținere va duce la expirarea garanției.

2.2. Instrucțiuni de siguranță și riscuri aplicabile

6 ATENȚIE

Risc de rănire și/sau deteriorare

- Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile din acest manual. În caz contrar, vă puteți accidenta sau produsul se poate deteriora.





Rețineți următoarele avertismente generale în timpul utilizării:








- Nu folosiți scaunul cu roțile dacă vă aflați sub influența alcoolului, medicamente sau alte substanțe care vă pot influența abilitățile de călărie.
- Rețineți că unele părți ale acestui scaun cu roțile se pot încălzi sau reci foarte tare din cauza temperaturii ambientale, radiațiilor solare, dispozitivelor de încălzire. Aveți grijă la atingere. Purtați îmbrăcăminte de protecție dacă vremea este rece.
- Nu modificați produsul în niciun fel.

Rețineți că scaunul cu roțile poate interfera cu anumite tipuri de sisteme antifurt, în funcție de setările utilizate. Acest lucru poate provoca declanșarea alarmei magazinului.

Orice incident grav [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

2.3. Simboluri pe scaunul cu roțile

	Greutatea maximă a utilizatorului în kg
	Panta maximă sigură în ° (grade).
	Nu este destinat utilizării ca scaun într-un motor vehicul
	Denumirea tipului

	Număr de catalog
	Număr de serie
	Dispozitiv medical
	Producător
	Data fabricației
	Declarație de conformitate
	Atenție: informații importante
	Se recomandă citirea manualului


2.4. Transport

2.4.1. Dați-vă la o parte

Mișcați scaunul cu roțile folosind roțile sale și rostogolindu-l până la destinație.

Dacă acest lucru nu este posibil, ridicați scaunul cu roțile de părțile solide ale cadrului. Nu prindeți suporturile pentru picioare, cotiere sau roți.

De asemenea, puteți folosi mânerul tip pernă (1) pentru a transporta scaunul cu roțile. Mai întâi, îndepărtați suporturile pentru picioare (vezi §3.3.) și pliați scaunul cu roțile manual (vezi §2.5.). Puteți apoi apuca mânerul de pe ambele părți ale scaunului cu roțile și transporta scaunul cu roțile în locul dorit.

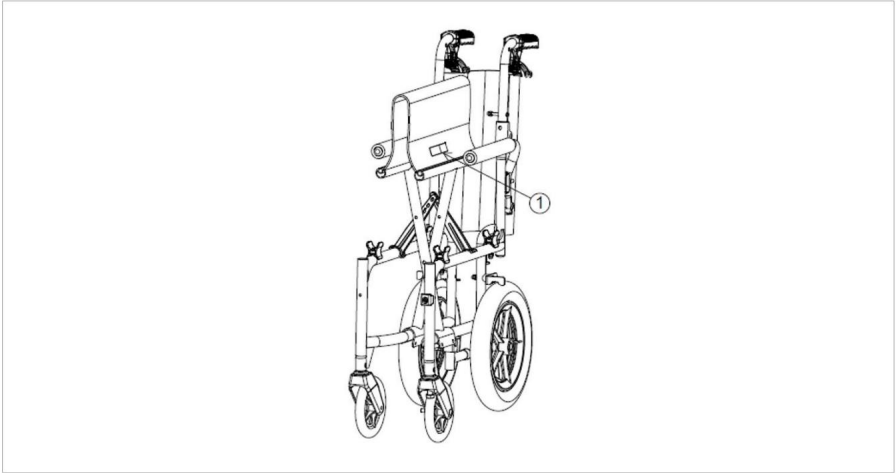

2.4.2. Transport cu vehiculul, ca bagaj

6 AVERTISMENT

Risc de rănire

- NU utilizați scaunul cu roțile ca scaun într-un vehicul, consultați următoarele simbol.



- Asigurați-vă că scaunul cu roțile este atașat corect pentru a evita accidentarea cauzată de pasagerii în timpul coliziunii sau al frânării bruște.
- NU folosiți NICIODATĂ aceeași centură de siguranță pentru a fixa scaunul cu roțile și pasagerul.

1. În calitate de utilizator de scaun cu roțile, transferați-vă pe un scaun auto, consultați §3.6.
2. Scoateți suporturile pentru picioare și alte accesorii.
3. Îndoiiți scaunul cu roțile la dimensiunea sa cea mai compactă, conform instrucțiunilor instrucțiunile din §2.5..
4. Depozitați scaunul cu roțile, suporturile pentru picioare și accesoriile în bagaje compartimentul pentru bagaje sau în spatele scaunului pasagerului. Dacă compartimentul pentru bagaje și compartimentul pentru pasageri NU sunt separate sau închise, fixați în siguranță cadrul scaunului cu roțile de vehicul. Puteți utiliza o centură de siguranță disponibilă în vehicul.

2.5. Pliere/Desfacere

6 ATENȚIE

Risc de rănire

- Asigurați-vă că degetele, hainele sau cataramele nu se vor prinde în timpul (des)pliere.

2.5.1. Deplierea scaunului cu roțile

1. Poziționați-vă în spatele scaunului cu roțile.
2. Deschideți spătarul, vezi §3.4.
3. Folosiți mânerul pentru a deschide scaunul cu roțile cât mai mult posibil.
4. Poziționați-vă în fața scaunului cu roțile.
5. Împingeți ambele tuburi de ședere în jos până când se fixează în poziția lor.
6. Montați suporturile pentru picioare (§3.3.).

2.5.2. Plierea scaunului cu roțile

1. Rabatați plăcile pentru picioare sau scoateți suporturile pentru picioare (vezi § 3.3.).
2. Rabatați spătarul, vezi §3.4.
3. Luați scaunul din față și din spate și trageți-l în sus.

2.6. Depozitare

6 ATENȚIE

Risc de deteriorare

- Asigurați-vă că scaunul cu roțile este depozitat într-un mediu uscat pentru a preveni apariția mușgaiului și deteriorarea tapițeriei, consultați și capitolul 6.

3. Utilizarea scaunului cu roțile

6 ATENȚIE

Risc de rănire și/sau deteriorare

- Citiți mai întâi capitolele anterioare și informați-vă despre utilizarea preconizată. NU utilizați scaunul cu roțile decât ați citit și ați înțeles pe deplin toate instrucțiunile.
- În caz de îndoieli sau întrebări, nu ezitați să contactați distribuitorul local specializat, furnizorul de servicii de întreținere sau consilierul tehnic pentru a vă ajuta în acest sens.
- Asigurați-vă că mâinile, hainele, curelele, cataramele sau bijuteriile nu vă intră în contact cu prinse de roți sau alte piese mobile în timpul utilizării.

3.1. Centură de siguranță

Fixați centura de siguranță prin introducerea cataramii în receptor. Dacă este necesar, ajustați lungimea curelelor.

Pentru a deschide centura de siguranță, apăsați clemele cataramii pentru a o elibera din suport.

3.2. Acționarea frânelor

6 ATENȚIE

Risc de rănire

- Frânele nu sunt folosite pentru a încetini scaunul cu roțile în timpul Folișiți frâna doar pentru a preveni mișcările accidentale ale scaunului cu roțile.
- Buna funcționare a frânelor este influențată de uzura și contaminarea anvelopelor (apă, ulei, noroi, ...). Verificați starea anvelopelor înainte de fiecare utilizare.
- Frânele sunt reglabile și se pot uza. Verificați funcționarea frânelor înainte de fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că scaunul cu roțile se află pe o suprafață plană și orizontală înainte de a elibera frânele. Nu eliberați niciodată ambele frâne simultan.

3.2.1. Frâne de însoțire

Aceste frâne pot fi acționate doar de către un însoțitor.

3.2.1.1. Pentru a acționa frânele:

1. Trageți maneta de frână (1) spre mâner.
2. Blocați maneta de frână apăsând în jos maneta de blocare (2).
3. Eliberați maneta de frână (1).

3.2.1.2. Pentru a elibera frânele:

1. Trageți de maneta de frână (1). Maneta de blocare (2) va fi eliberată prin aceasta.
mi care.
2. Eliberați maneta de frână (1).



3.2.2. Frâne de parcare

Aceste frâne pot fi acționate de către utilizator.

3.2.2.1. Frâne de parcare obișnuite

Pentru a acționa frânele:

1. Împingeți maneta de frână (1) înainte în jurul curburii din accesoriul de frână.
Blocați-o în poziție în deschiderea scurtă.

Pentru a elibera frânele:

1. Împingeți maneta de frână (1) înainte în jurul curbei și eliberați-o complet în deschizătura lungă.



3.2.2.2. Frâne de parcare în combinație cu frâne cu tambur B74

Pentru a acționa frânele:

1. Împingeți manetele de frână înainte până când simțiți un clic distinct.

Pentru a elibera frânele:

1. Eliberați o frână trăgând maneta înapoi.
2. Repetați acest lucru pentru a doua roată și frâna de mână.


3.3. Montarea sau demontarea suporturilor pentru picioare

3.3.1. Montarea suporturilor pentru picioare

1. Țineți suportul pentru picioare lateral, în partea exterioară a cadrului scaunului cu rotile și Montați capacul tubular (1) în cadru.
2. Rotiți suportul pentru picioare spre interior până când se fixează în poziție cu un clic.
3. Rotiți placa de bază în jos.

3.3.2. Demontarea suporturilor pentru picioare

1. Trageți de manetă (2).
2. Balansați suportul pentru picioare spre exterior.
3. Ridicați suportul pentru picioare pentru a-l scoate.

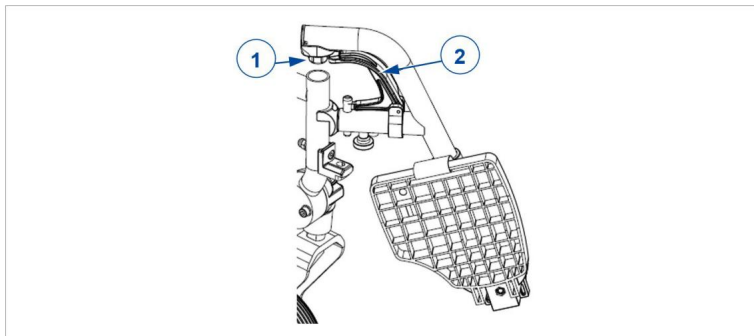

3.4. Deplierea/rabatarea spătarului

6 ATENȚIE

Risc de rănire


- Asigurați-vă că spătarul este blocat corect înainte de utilizare.

3.4.1. Rabatarea spătarului

1. Țineți de tubul spătarului și apăsați maneta (1) de pe tubul spătarului până când este ridicată din tubul spătarului (3).
2. Coborâți țeava superioară a spătarului (2) până când este complet pliată.

3.4.2. Deplierea spătarului


1. Ridicați țeava spătarului (2) în sus până când se blochează.
2. Asigurați-vă că spătarul este fixat în siguranță în poziție.

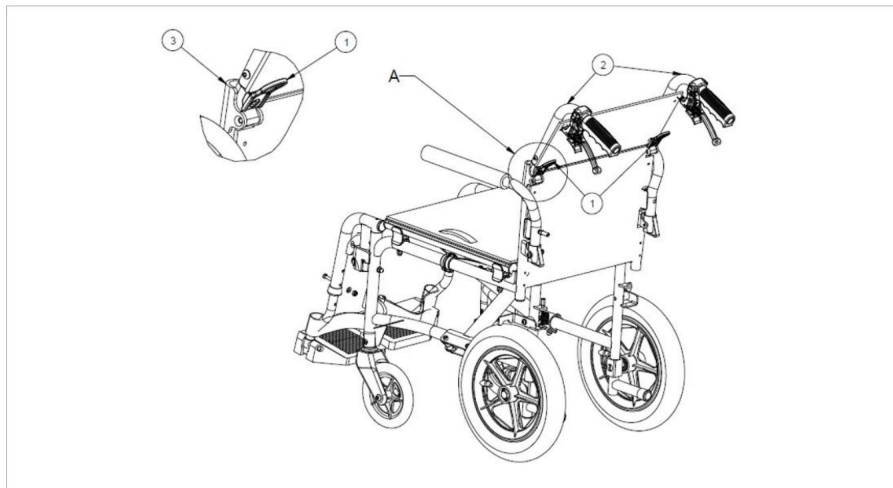

3.5. Deschiderea sau închiderea cotierelor B03


3.5.1. Rabatarea cotierei în jos

1. Rabatați suportul pentru brațe spre față.
2. Trageți în sus maneta (2) de pe capacul tubului (3) .
3. Fixați țeava frontală a suportului pentru braț (4) în capacul tubului (3).

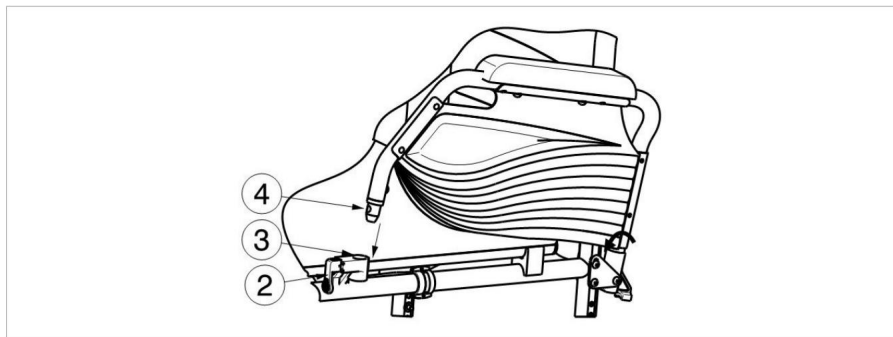

3.5.2. Rabatarea cotierei pentru deschidere

1. Trageți de manetă (2) și trageți în sus partea din față a suportului pentru braț (1).
2. Rabatați suportul pentru brațe spre spate.

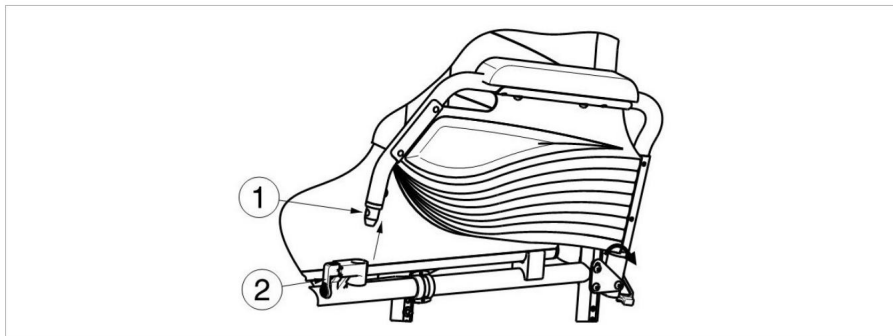

3.6. Transfer în și din scaunul cu rotile

6 ATENȚIE

- În cazul în care nu puteți efectua transferul în siguranță, rugați pe cineva să vă ajute.
- Nu stați pe tăbliile scaunelor.
1. Poziționați scaunul cu roțile cât mai aproape de scaunul, canapeaua sau patul către/din care doriți să vă transferați.
 2. Asigurați-vă că ambele frâne ale scaunului cu roțile sunt activate.
 3. Rabotați în sus plăcile de susținere pentru a împiedica staționarea pe ele.
 4. Transfer în/din scaunul cu roțile.

3.6.1. Poziția corectă în scaunul cu roțile

Poziționează-ți spatele cât mai aproape de spătar.

3.7. Mersul în scaun cu rotile

6 ATENȚIE

Risc de rănire și deteriorare

- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:
 - frânele de parcare funcționează corect.
 - anvelopele sunt în stare bună, vezi § 5.2.1.
- NU conduceți pe pante, obstacole, trepte sau borduri mai mari decât cele specificate în § 6..
- Când opriți pe o pantă (mică), folosiți frânele.
- Asigurați-vă că toate cele patru roți ating pământul în timp ce urcați sau coborâți o pantă.
- Urcați pantele cât mai încet posibil.
- Rămâneți întotdeauna pe trotuar când circulați pe drumurile publice.
- Acordați atenție dacă drumul are gropi sau crăpături care pot cauza prindere în siguranță a roților.
- Evitați pietrele și alte obiecte care pot bloca roțile.
- Asigurați-vă că plăcile de susținere nu ating pământul în timp ce efectuați o mișcare obstacol.
- Nu folosiți scaunul cu rotile pe o scară rulantă.
 - Dacă este disponibilă, purtați centura de siguranță.
- Țineți întotdeauna cont de raza de oscilație a plăcii de susținere pentru a preveni rănirea trecătorilor sau deteriorarea obiectelor.
- Scările trebuie urcate întotdeauna cu ajutorul a doi însoțitori.
- Nu încercați niciodată să folosiți scări care nu sunt potrivite pentru scaune cu rotile.

4. Instalare și reglare

Instrucțiunile din acest capitol sunt destinate distribuitorului specializat.

6 ATENȚIE

Risc de rănire sau deteriorare •

Utilizați numai setările descrise în acest manual. • Utilizați numai piesele și uneltele descrise în acest manual. • Utilizați numai piese de schimb originale sau de schimb aprobate de Vermeiren. • Împiedicați accesul trecătorilor în zona de lucru. • Păstrați zona de (de)asamblare curată și ordonată pentru a preveni căderea. • Colectați toate piesele mici într-o cutie sau geantă. • Asigurați-vă că toate șuruburile sunt fixate ferm înainte de a porni.

4.1. Conținutul livrării

Următoarele componente fac parte din livrare:

- Cadru cu cotiere, șezut și spătar, roți față și spate • Suporturi pentru picioare
- Unelte
- Manual
- Opțiuni

Înainte de utilizare, verificați dacă totul este inclus și dacă niciun produs nu este deteriorat.

4.2. Instrumente


Pentru a (de)monta și regla scaunul cu roțile, sunt necesare următoarele unelte:

- Cheie Allen nr. 4 •
- Cheie fixă nr. 10


4.3. Reglarea frânelor

4.3.1. Frâne de însoțire

Rotiți (1) pentru a regla tensiunea firului de frână.

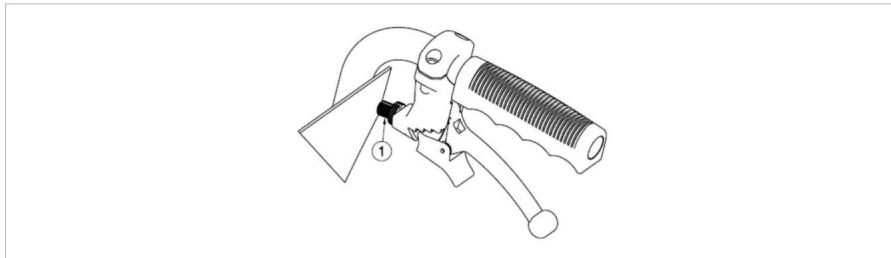

4.3.2. Frâne de parcare în combinație cu frâne cu tambur B74

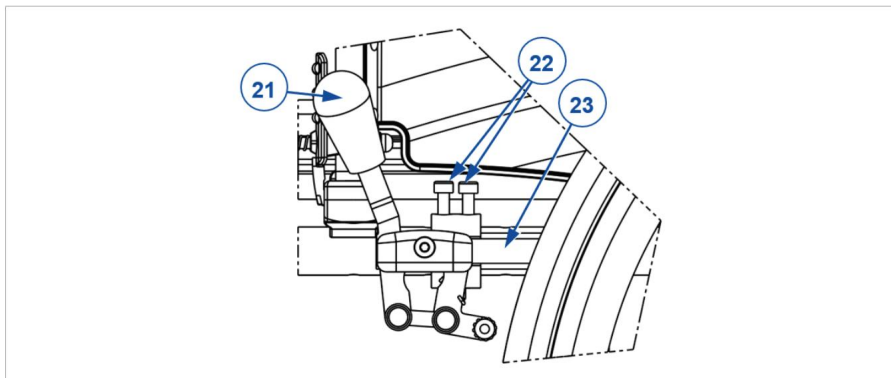

Reglați forța de frânare corectă.


1. Eliberați frânele.
2. Slăbiți șuruburile cu cap hexagonal (22) pentru a face frâna să poată aluneca liber.
3. Glisați frâna peste ghidaj (23) în poziția dorită.
4. Strângeți din nou șuruburile cu cap hexagonal (22).
5. Verificați dacă frâna funcționează corect: roata este blocată, dar frâna poate fi acționată cu ușurință. Dacă nu este cazul, repetați pașii de mai sus.
6. Repetați această ajustare pentru a doua frână de mână. Asigurați-vă că ambele frâne sunt reglate identic.

4.4. Lungimea suportului pentru picioare

6 ATENȚIE

Risc de deteriorare


- Asigurați-vă că suporturile pentru picioare nu ating pământul. Mențineți o distanță minimă distanță de siguranță de 60 mm față de sol.

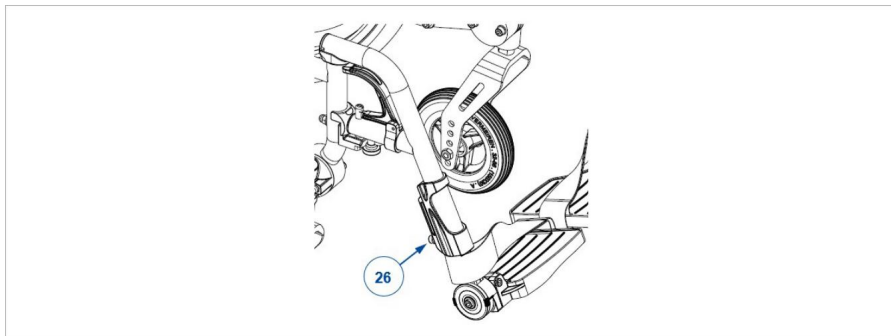

Ajustați lungimea după cum urmează:

1. Scoateți șurubul cu cap hexagonal (26) din spatele suportului pentru picioare.
2. Reglați suportul pentru picioare la o lungime confortabilă.
3. Strângeți din nou ferm șurubul cu cap hexagonal.
4. Repetați acest lucru pentru al doilea suport pentru picioare. Asigurați-vă că suporturile pentru picioare sunt poziționate identic.

4.5. Poziția plăcii de bază

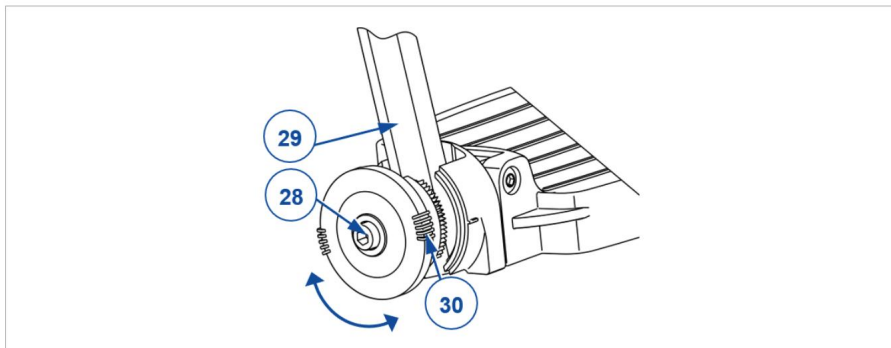

Plăcuța (plăcile) de bază poate (pot) fi utilizată (utilizate) în 2 poziții: față și spate. În mod implicit, fiecare placă de bază este reglată cu placa de bază în poziția spate.

Pentru a plasa placa de bază în poziția frontală:

1. Scoateți șuruburile cu cap hexagonal (28) ale ambelor plăci de bază.
2. Schimbați placa de bază stângă și dreaptă.
3. Strângeți ferm șuruburile cu cap hexagonal (28) .

4.6. Unghiul plăcii de bază

Reglați unghiul plăcii de bază la clema sa dințată:

1. Slăbiți șurubul cu cap hexagonal (28) al suportului pentru picioare (29).
2. Rotiți placa de bază în unghiul dorit (80°-100°). Liniuțele (30) de pe Clema dințată indică pozițiile unghiulare.
3. Strângeți din nou șurubul cu cap hexagonal.
4. Repetați acest lucru pentru a doua placă de bază.

5. Întreținere

4 Îngrijirea regulată asigură menținerea scaunului rulant într-o stare perfectă de funcționare. Pentru manualul de întreținere, consultați site-ul web Vermeiren: www.vermeiren.com.

5.1. Puncte de întreținere

6 ATENȚIE

Risc de rănire și deteriorare

- Reparațiile și înlocuirile pot fi efectuate numai de către persoane instruite și trebuie utilizate numai piese de schimb originale Vermeiren.

4 Ultima pagină a acestui manual conține un formular de înregistrare pentru distribuitorul specializat pentru a înregistra fiecare revizie.
Frecvența serviciului depinde de frecvența și intensitatea utilizării.
Contactați distribuitorul pentru a stabili un program comun de inspecție/întreținere/reparații.

5.1.1. Înainte de fiecare utilizare

Verificați următoarele puncte:

- Toate piesele: Prezente și nedeteriorate sau neuzate.
- Toate piesele: Curățați, vezi § 5.2.2.
- Roți, spătar, șezut, suporturi pentru gambe, cotiere, suporturi pentru picioare: Bine fixate.
- Starea roților/anvelopelor, vezi § 5.2.1.
- Starea pieselor cadrului: Fără deformări, instabilitate, slăbiciune sau slăbiciune conexiuni.
- Șezutul, spătarul, pernițele pentru brațe, pernițele pentru gambe și tetiera (dacă există): Fără uzură excesivă (cum ar fi îndoite, deteriorări sau rupturi).
- Frâne: Nedeteriorate și funcționale.

Contactați distribuitorul specializat pentru eventuale reparații sau înlocuiri de piese.

5.1.2. Anual sau mai des

Solicitați inspecția și revizia scaunului rulant la distribuitorul specializat, cel puțin o dată pe an sau mai des. Frecvența minimă de întreținere depinde de utilizare și, prin urmare, trebuie stabilită de comun acord cu distribuitorul specializat.

5.2. Instrucțiuni de întreținere

5.2.1. Roți și anvelope

4 Funcționarea corectă a frânelor depinde de starea anvelopelor și se poate modifica din cauza uzurii și a contaminării (apă, ulei, noroi...).

Păstrați roțile fără fire, păr, nisip și fibre.

Verificați profilul anvelopelor. Dacă adâncimea benzii de rulare este mai mică de 1 mm, anvelopele trebuie înlocuite. Contactați distribuitorul specializat în acest sens.

Umflați fiecare anvelopă la presiunea corectă (consultați indicația de presiune de pe anvelope).

5.2.2. Curățare

6 ATENȚIE

Risc de deteriorare cauzată de umiditate

- Nu folosiți niciodată un furtun sau un aparat de curățat cu înaltă presiune pentru a curăța scaunul cu roțile.

Ștergeți toate părțile rigide cu o cârpă umedă (nu îmbibată cu apă). Dacă este necesar, folosiți un săpun blând, potrivit pentru lacuri și materiale sintetice.

Tapițeria poate fi curățată cu apă caldă și un săpun blând. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi pentru curățare.

5.2.3. Dezinfecție

6 ATENȚIE

Risc de deteriorare

- Dezinfecțiile pot fi efectuate numai de către persoane instruite. Consultați medicul distribuitor specializat.

5.3. Depanare

Chiar dacă utilizați corect scaunul cu roțile, poate apărea o problemă tehnică. În acest caz, contactați distribuitorul local specializat.

6 AVERTISMENT

Risc de rănire și deteriorare

- NU încercați NICIODATĂ să vă reparați singur scaunul cu roțile.

Următoarele simptome pot indica o problemă gravă. Prin urmare, contactați întotdeauna distribuitorul specializat dacă observați oricare dintre următoarele abateri:

- Sunet ciudat;
- Uzură neuniformă a benzii de rulare la una dintre anvelope;
- Mișcări sacadate;
- Scaunul cu roțile se deflectă într-o parte;
- Ansambluri de roți deteriorate sau sparte.

5.4. Durata de viață așteptată

Scaunul cu roțile este proiectat să aibă o durată medie de viață de 5 ani.

În funcție de frecvența de utilizare, de circumstanțele de condus și de întreținere, durata de viață a scaunului cu roțile va crește sau va scădea.

5.5. Reutilizare

Înainte de fiecare reutilizare, dezinfectați, inspectați și reparați scaunul cu roțile conform instrucțiunilor din § 5.1 și § 5.2.

5.6. Sfârșitul utilizării

La sfârșitul duratei de viață, trebuie să eliminați scaunul cu roțile în conformitate cu legislația locală de mediu. Cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să dezamblați scaunul cu roțile pentru a facilita transportul pieselor reciclabile.

5.7. Garanție

Garanția acestui produs este supusă termenilor și condițiilor generale ale fiecărei țări.

6. Specificații tehnice

Detaliile tehnice de mai jos sunt valabile numai pentru acest scaun cu rotile, la setări standard și condiții ambientale optime. Luați în considerare aceste detalii în timpul utilizării. Valorile nu mai sunt aplicabile dacă scaunul dumneavoastră a fost modificat, deteriorat sau este uzat sever.

Marca	Vermeiren
Grup de produse	Scaun cu rotile manual
Tip	Bobby Evo
Descriere	Dimensiuni
Greutatea maximă a utilizatorului	115 kg
Lungime totală	1010 mm
Lățime totală	460 mm 490 mm 550 mm Cu cotiere B03: 490 - 520 - 570 mm
Înălțime totală	900 mm
Lungime pliată (fără suport pentru picioare)	680 mm
Lățime pliată	260 mm
Înălțime pliată	750 mm
Masa totală	12,4 kg Cu cotiere B03: 13 kg
Masa părții celei mai grele	10,1 kg Cu cotiera B03: 10,7 kg
Stabilitate statică la vale	10°
Stabilitate statică în urcare	10°
Stabilitate statică laterală	10°
Unghiul planului scaunului	5°
Adâncimea efectivă a scaunului	420 mm
Lățimea efectivă a scaunului	390 mm 420 mm 480 mm
Înălțimea suprafeței scaunului la marginea frontală	490 mm
Unghiul spătarului	5°
Înălțimea spătarului	440 mm
Ne rezervăm dreptul de a introduce modificări tehnice. Toleranță de măsurare +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	

Marca	Vermeiren
Grup de produse	Scaun cu roțile manual
Tip	Bobby Evo
Descriere	Dimensiuni
Distanța dintre placa de bază și scaun	330 - 500 mm
Unghiul piciorului față de suprafața scaunului	114°
Distanța dintre cotieră și scaun	200 mm Cu cotieră B03: 220 mm
Poziția orizontală a axei (deformare)	21 mm
Diametrul minim de strunjire	1500 mm
Diametrul roților din spate	12,5"
Diametrul roților din față	155 mm
Temperatura de utilizare	+5°C - +41°C
Umiditatea de depozitare și utilizare	30% - 70%
Ne rezervăm dreptul de a introduce modificări tehnice. Toleranță de măsurare +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°	